

ドレッシング材の貼り付けに関する各病院の標準実施要綱に従い皮膚の前処理を行います。接着性を高めるため、一部の患者では皮膚の前処理または除毛が必要となる場合があります。

ライン固定時の使用例 (IV ストリップ)



底面の剥離紙を片側を剥がし、グリップロックをラインの下に差し入れます。次にもう一方の底面剥離紙を剥がし、適切な位置に貼り付けます。



上面のストラップを開き、内側の剥離紙を剥がして粘着部を露出させ、ラインまたはハブの位置を粘着部の中心に合わせます。



ラインまたはハブを粘着部に固定します。



上面のストラップをラインまたはハブに被せて固定し、接着材を所定の位置に押し付け、しっかりと固定します。上面ストラップは再度剥がすことができ、カテーテル・ラインまたはハブの点検や調節をすることができます。

製品情報

型番	商品名	用途	チューブ径	全長	梱包単位	JAN
3300M	GRIP-LOK M サイズ	中型のチューブの固定	3.0～8.0mm	8.9cm (3.5 インチ)	100/箱	4946685170118

製造販売元

株式会社 **林寺メディノール**
〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号
TEL: 076-222-6531 FAX: 076-222-2922

外国製造所

