

ドレッシング材の貼り付けに関する各病院の標準実施要綱に従い皮膚の前処理を行います。
 接着性を高めるため、一部の患者では皮膚の前処理または除毛が必要となる場合があります。

末梢挿入中心静脈カテーテル (PICC) 固定時の使用例



1
 上面のストラップを開き、内側の剥離紙を剥がします。
 ハブが粘着面の中心に位置するよう、カテーテルの下へグリップロックを差し入れます。



2
 ストラップをカテーテルに被せて固定し、粘着面にハブとカテーテルがしっかり貼付くよう周囲を押さえます。



3
 グリップロックとカテーテルを片手で所定の位置に保ちながら、片側の底面の剥離紙を剥がし、皮膚に貼付け固定します。



4
 次にもう片方の底面の剥離紙を剥がし、そちら側も皮膚に貼付け固定します。
 グリップロックと皮膚・カテーテルがしっかりと接着するよう周縁部を軽く押さえます。

製品情報

型番	商品名	用途	チューブ径	全長	梱包単位	JAN
3300MWA	GRIP-LOK PICC	大型チューブ、PICC および CVC 固定	6.0～13.0mm	8.9cm (3.5 インチ)	100/箱	4946685170149

製造販売元

 **株式会社 林寺メディノール**
 〒920-0947 石川県金沢市笠舞本町2丁目26番7号
 TEL: 076-222-6531 FAX: 076-222-2922

外国製造所

